



Desinfektions- und Seifenspender by Trispend

Masterspend

Der hygienekonforme für Einweggebinde

TRISPEND

TRISPEND AG

Sommerstrasse 37

CH-8580 Amriswil

Telefon: 0041 71 414 25 75

Telefax: 0041 71 414 25 76

E-mail: info@trispend.ch

Internet: www.trispend.ch

Darum Masterspend:

Kein Umschütten	↔	Originalgebinde des Mittelherstellers
Vollständige Entleerung der Gebinde	↔	Originalgebinde steht auf dem Kopf
Mittelherstellerunabhängigkeit	↔	Verschiedene aufschraubbare Adapter
Minimale Kontamination	↔	Kurze Wege des Mittels im Spender
Reinigungsfreundlichkeit	↔	Einfache Montage und Demontage
Montage in Spiegelschrank möglich	↔	Bedienung von unten

MASTERSPEND

Der mittelherstellerunabhängige Desinfektions- und Seifenspender

Mit Schraubadaptoren für Einweggebinde bis 1000 ml verschiedener Hersteller von Seifen- und Desinfektionsmittel. Aufgebaut auf unserem bewährten Pumpensystem welches mit Hand- oder Armhebelbedienung ausgeführt wird. Sie wählen Ihren Lieferanten für die zum Einsatz kommenden Seifen- und Desinfektionsmittel. Wir liefern den Spender mit dem entsprechenden Gebindeadapter. Die Mittel können gänzlich entleert werden, was sich auch in ökologischer Hinsicht bewährt.

Überzeugen Sie sich von unseren Produkten.



Masterspend mit
Handhebel



Masterspend mit
Armhebel kurz




Masterspend mit
Armhebel lang



Abdeckung zu Masterspend in Chromstahl oder pulverbeschichtet.


Flasche einsetzen

1. Adapter (A) auf Flasche (B) schrauben
2. Schieber (C) ganz nach vorne ziehen
3. Flasche (B) mit Adapter (A) einsetzen
4. Schieber (C) ganz schliessen

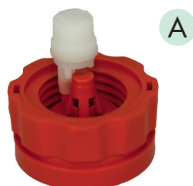

Masterspend Adapter

für Ihre Hygieneprodukte finden Sie unter:
www.trispend.ch/adapter.php

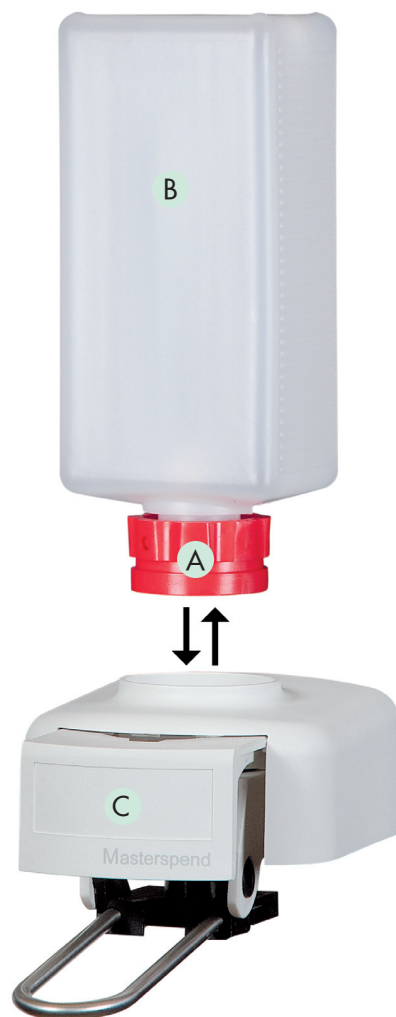

Der Masterspend aus GK verstärktem POM ist resistent gegen Seifen-Lotion und gegen alkoholische sowie ethanolhaltige Desinfektionsmittel.

Dieser hygienekonforme Spender wird im Spital-, Heim- und Pflegebereich, sowie in Arztpraxen und Spitexdiensten eingesetzt.

Die Spender bestechen durch ihre einfache aber hochfunktionale Bauweise. Der speziell entwickelte Spendermechanismus verhindert ein Nachtropfen der jeweiligen Flüssigkeit. Die Spender sind leicht zu reinigen und eventuell beschädigte Einzelteile einfach zu ersetzen.




Alle Teile sind einzeln erhältlich, diese finden Sie unter www.trispend.ch

Reinigung Masterspend




1. Spender aus Wandhalterung entfernen
2. Warmwasser (max. 70 °C) in obere Öffnung fliessen lassen und gleichzeitig Hand- oder Armhebel betätigen bis klares Wasser austritt
3. Gehäuse und Hand- oder Armhebel unter fliessendem Warmwasser reinigen oder in Geschirrspüler bei max: 70 °C reinigen

Einbaubeispiel



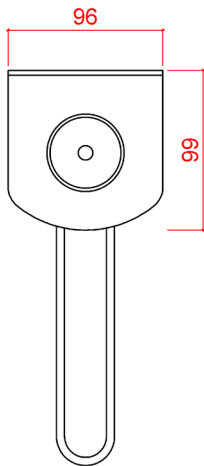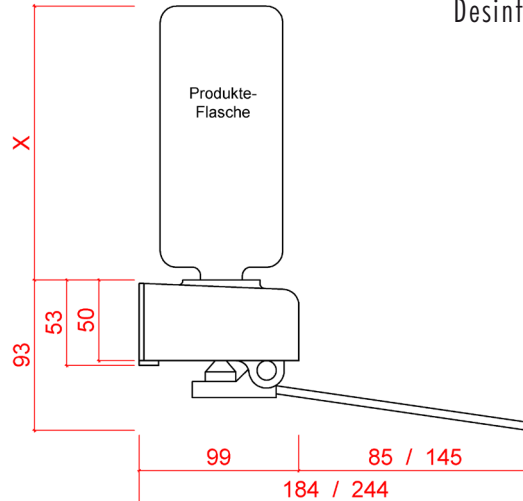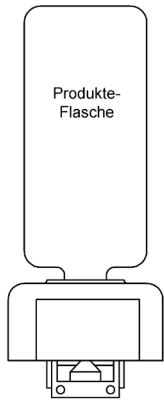

Masterspend
mit Armhebel 150 bzw. 210 mm

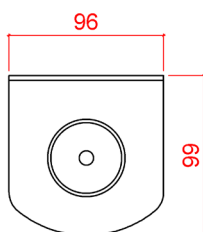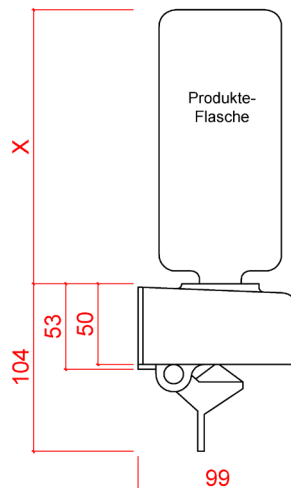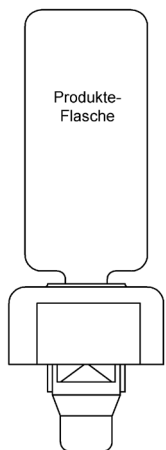

Masterspend
mit Handhebel

TRISPEND

TRISPEND AG
Sommerstrasse 37
CH-8580 Amriswil
Telefon: 0041 71 414 25 75
Telefax: 0041 71 414 25 76
E-mail: info@trispending.ch
Internet: www.trispending.ch